

Capitolo del Fascicolo Tecnico: <b>Scheda Tecnica</b>	Codice del documento: <b>FT. Achille</b>
Stato del documento: <b>Copia in distribuzione controllata</b>	Revisione: <b>00 del 15/04/2020</b>
Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta IBIS S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.	

# SCHEDA TECNICA

## *Visiera Paraschizzi*



<b>1</b>	Nome e codice	<b>Achille</b>
<b>2</b>	Descrizione	Visiera protezione
<b>3</b>	Indicazioni	La visiera paraschizzi Achille è progettata e realizzata allo scopo di proteggere gli occhi dell'operatore da schizzi e proiezioni
<b>4</b>	Nome fabbricante	IBIS srl P. Iva: 03512470612 www.ibcomunicazione.com
<b>5</b>	Indirizzo fabbricante	Via Larga Zona Industriale lotto 1.09 81038 - Trentola Ducenta (CE)
<b>6</b>	Dispositivo Riutilizzabile	Dopo ogni uso, prima di riporlo nella confezione, verificare l'integrità, lavare il DPI con sapone o con una soluzione alcolica (almeno 50% di alcool) per almeno 20 minuti, e lasciare asciugare
<b>7</b>	Dispositivo sterile	La visiera ACHILLE non è un prodotto sterile.
<b>8</b>	Capacità protettiva	Il Categoria coma da Regolamento (UE) 2016/425.
<b>9</b>	Conformità a norme tecniche e regolamenti	La visiera Achille è conforme alla norma UNI EN 166:2004 come da test report <b>N° 7792-0503841</b> . La sua realizzazione è conforme ai RES di cui all'All.II del Regolamento (UE) 2016/425. Allo stato attuale la produzione e commercializzazione è in Deroga come da Art. 15 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n°18
<b>10</b>	Confezionamento	La visiera Achille è confezionata con involucro plastico sigillato. Lo stesso è riciclabile (plastica)
<b>11</b>	Etichettatura	L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prodotto</li> <li>• la destinazione d'uso</li> <li>• il fabbricante</li> <li>• il numero di lotto</li> <li>• la data di scadenza</li> <li>• indicazioni di dispositivo riutilizzabile</li> <li>• condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione</li> </ul>

Capitolo del Fascicolo Tecnico: <b>Scheda Tecnica</b>	Codice del documento: <b>FT. Achille</b>
Stato del documento: <b>Copia in distribuzione controllata</b>	Revisione: <b>00 del 15/04/2020</b>
Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta IBIS S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• istruzioni specifiche di utilizzazione</li> <li>• avvertenze e/o precauzioni da prendere</li> </ul>
<b>12</b>	Controindicazioni e/o avvertenze	La visiera Achille, se utilizzata correttamente, non presenta controindicazioni. Si consiglia l'utilizzo della visiera in concomitanza con DPI preposti alla protezione delle mucose e vie respiratorie.
<b>13</b>	Modalità di smaltimento	Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti riciclabili solo se disinfettato prima di smaltirlo al fine di evitare contaminazioni.
<b>14</b>	Geometrie	
<b>15</b>	Accessori utilizzabili con il DPI	N.A.
<b>16</b>	Caratteristiche degli accessori	N.A.
<b>17</b>	Nome organismo notificato per la conformità del DPI	Realizzati in deroga come da Art. 15 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n°18
<b>18</b>	Indirizzo organismo notificato per la conformità del DPI	Realizzati in deroga come da Art. 15 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n°18
<b>19</b>	Numero organismo notificato per la conformità del DPI	Realizzati in deroga come da Art. 15 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n°18
<b>20</b>	Indirizzo internet per la dichiarazione di conformità UE	Realizzati in deroga come da Art. 15 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n°18